

Eigenanteil an der Plasmatherapie

Die Behandlung mit kaltem Plasma wird die Praxis mit Ihnen als Selbstzahler-Leistung abrechnen. Ihr Eigenanteil pro Sitzung beträgt _____ €.

Die empfohlene Behandlungsdauer ist abhängig vom Zustand und der Größe der Wunde. In den meisten Fällen reichen zwischen 6 und 12 Anwendungen aus.

Mit der Unterzeichnung des Behandlungsvertrages stimmen Sie der Behandlung und der Zahlung Ihres Eigenanteils zu.

Praxisstempel



Hersteller:
terrapiasma medical GmbH
Parkring 32
85748 Garching
info@terrapiasma-medical.com

www.terrapiasma-medical.com



Bessere Wundheilung
mit kaltem Plasma
als Zusatztherapie

Patienteninformation

Liebe Patientin, lieber Patient,

Ihr Arzt empfiehlt Ihnen die Behandlung mit kaltem Plasma als Zusatztherapie für Ihre Wunde. Durch die schonende, neuartige Therapie kann auch bei Ihnen der Heilungsverlauf deutlich verbessert werden.

- Bei 6 von 10 Patienten kann kaltes Plasma eine deutliche Verbesserung der Wundsituation erreichen – bis hin zum kompletten Wundverschluss.
- Die Therapie ist schmerzfrei und hat keine Nebenwirkungen.
- Die Kaltplasmatherapie ergänzt die Therapie Ihrer Wunde. Sie ersetzt nicht die fachgerechte Wundversorgung.



So verläuft die Behandlung mit kaltem Plasma

In dieser Praxis verwenden wir das System **plasma care®** der Firma terraplasma medical. Zur Behandlung wird das Gerät mit einem sterilen Abstandshalter auf Ihre Wunde gelegt und aktiviert.

- Je nach Wundgröße dauert die Behandlung einige Minuten pro Sitzung.
- Der empfohlene Behandlungsrhythmus liegt bei 1-3 Mal pro Woche.
- Während der Behandlung werden Sie einen leichten Ozongeruch wahrnehmen. Ihre positiven Effekte auf die Wundheilung entfaltet die Plasma-Therapie in den folgenden Tagen.

