



Patientenaufklärung

# plasma care®

## KALTPLASMATHERAPIE

**Die Kaltplasmatherapie ist eine neue innovative Methode zur Behandlung von infizierten chronischen Wunden, zur Vorbeugung von Wundinfektionen, sowie zur Aktivierung der Wundheilung. Diese Therapie bieten wir in unserer Praxis an.**

Bei der Kaltplasmatherapie handelt es sich um ein neuartiges, effizientes Verfahren zur Abtötung von Keimen aller Art.

Kaltes Plasma ergänzt die Wundreinigung und Wunddesinfektion sowie die Behandlung mit keimreduzierenden Therapeutika und Wundauflagen. Zudem kann die Kaltplasmatherapie die Wundheilung anregen. Die Kaltplasmabehandlung wird im Anschluss an die Wundreinigung und ggf. nach dem Abtragen von Wundbelegen durchgeführt. Damit die Kaltplasmatherapie insbesondere bei bereits infizierten chronischen

Wunden ihre maximale Effektivität erreicht, empfehlen wir, die Therapie zweimal pro Woche über einen Zeitraum von ungefähr sechs Wochen durchzuführen.

Nach bisherigen Erfahrungen verursacht die Behandlung weder Schmerzen noch wurden Nebenwirkungen beobachtet.

**Die Behandlung wird von vorliegenden Resistenzen oder Allergien nicht beeinflusst.**

**Weiterführende Informationen finden Sie unter [www.terraplasma-medical.com](http://www.terraplasma-medical.com)**

Praxisstempel



BAKTERIENREDUKTION



GEEIGNET FÜR PATIENTEN  
MIT SCHRITTMACHER



SICHER –  
KEINE GEWEBESCHÄDIGUNG  
BEKANT



KEINE RESISTENZEN UND  
ALLERGIEN BEKANT

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Diese Informationen dienen zu Ihrer Vorbereitung für das Aufklärungsgespräch mit der Ärztin/dem Arzt (im Weiteren Arzt). Im Gespräch wird Ihr Arzt die Vor- und Nachteile der geplanten Maßnahme erläutern und Sie über Ihre Risiken aufklären. Er wird Ihre Fragen beantworten, um Ängste und Besorgnisse abzubauen. Anschließend können Sie Ihre Einwilligung in die Ihnen vorgeschlagene Behandlung erteilen. Nach dem Gespräch erhalten Sie eine Kopie des ausgefüllten und unterzeichneten Bogens.

## WAS IST KALTES PLASMA UND WIE WIRKT ES?

Das **plasma care®** generiert ein ionisiertes Gas, welches ein reaktiver Mix aus Elektronen, Ionen, Ozon und weiteren reaktiven Verbindungen ist. Diese Bestandteile des Plasmas inaktivieren Bakterien, multi-resistente Erreger, Pilze und auch Viren. Gleichzeitig aktivieren sie Zellwachstum, die Durchblutung und den Stoffwechsel zur Zelle und regen damit die Wundheilung an. Menschliche Zellen werden von Plasma nicht geschädigt; sie sind durch die Zellmembran und zellbiologische Schutzmechanismen zusätzlich geschützt.



## WANN WIRD DIE THERAPIE EMPFOHLEN?

- **Chronische Wunden**, die über circa 8 Wochen keine Heilungstendenz zeigen
- Wunden mit einer **starken bakteriellen Belastung**
- Wunden, die mit **multiresistenten Keimen** besiedelt sind
- Bei **stagnierender Wundheilung**
- Patienten mit **Allergien oder Resistenzen gegen Antiseptika und Antibiotika**

## ERSTATTUNG

Da es sich um ein neues innovatives Verfahren handelt, wird die Kaltplasmatherapie noch nicht von allen Kostenträgern (Krankenkasse/Beihilfe/Berufsgenossenschaft) übernommen. Es handelt sich um eine privatärztliche Zusatzleistung (IGeL), für die Sie eventuell persönlich aufkommen müssen.

## EINVERSTÄNDNIS

Die Wirkung und Zweck einer Kaltplasmatherapie sind mir von Herrn/Frau \_\_\_\_\_ verständlich und ausführlich in einem persönlichen Gespräch geschildert worden.

Ich habe keine weiteren Fragen, fühle mich ausreichend aufgeklärt und willige hiermit nach ausreichender Bedenkzeit in die Behandlung ein.

\_\_\_\_\_  
Datum, Ort

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Patient

Ich weiß, dass die Behandlung eventuell nicht erstattungsfähig ist und dass die Kosten ggf. von mir zu tragen sind.

\_\_\_\_\_  
Datum, Ort

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Patient

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Arzt



BAKTERIENREDUKTION



GEEIGNET FÜR PATIENTEN  
MIT SCHRITTMACHER



SICHER –  
KEINE GEWEBESCHÄDIGUNG  
BEKANNT



KEINE RESISTENZEN UND  
ALLERGIEN BEKANNT